

Das Protokoll

Kopfdaten (einmalig ausfüllen)

Betreiber / Einrichtung		Standort des Geräts	
Gerät / Modell		Seriennummer	
In Betrieb seit		Protokoll für das Jahr	
Verantwortliche Person		Vertretung	

A · Monatliche Sichtkontrolle

Monat	Datum	Statusanzeige i. O.	Gehäuse un- schädigt	frei zugänglich & gekennzeichnet	Zubehör vollständig	Bemerkung	Kürzel
Januar							
Februar							
März							
April							
Mai							
Juni							
Juli							
August							
September							
Oktober							
November							
Dezember							

Eintragen mit „i. O.“ oder Haken; Abweichungen unter Bemerkung notieren und Maßnahme veranlassen. Das Intervall ist ein Orientierungswert — maßgeblich bleibt die Gebrauchsanweisung des Geräts.

B · Verbrauchsmaterial und Verfallsdaten

Bauteil	Charge / Typ	Verfallsdatum	gewechselt am	nächster Wechsel	Kürzel
Elektroden (Erwachsene)					
Elektroden (Erwachsene) – Ersatzsatz					
Kinderelektroden / Kindermodus					
Batterie / Akku					
Rea-Set (Schere, Rasierer, Tuch, Handschuhe)					
Beatmungshilfe					

Elektroden und Batterie altern unabhängig von der Nutzung. Nach jedem Einsatz sind die aufgeklebten Elektroden verbraucht und müssen ersetzt werden.

C · Sicherheitstechnische Kontrolle und Instandhaltung durch Fachkundige

Datum	Art der Maßnahme	ausgeführt von (Stelle / Person)	Ergebnis	nächster Termin	Beleg-Nr.

Ob und in welchem Abstand eine sicherheitstechnische Kontrolle erforderlich ist, ergibt sich aus den Herstellerangaben in Verbindung mit der MPBetreibV. Prüfberichte bitte zusammen mit diesem Protokoll aufbewahren.

D · Einweisung der Anwenderinnen und Anwender

[illegible]

E · Einsätze und besondere Vorkommnisse

Datum	Uhrzeit	Ort / Anlass	Maßnahmen danach	wieder einsatzbereit am	Kürzel

Nach jedem Einsatz: Elektroden ersetzen, Batteriezustand prüfen, Gerät reinigen und das Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft hier eintragen.

F · Bestätigung

Mit der Unterschrift bestätigt die verantwortliche Person, dass die eingetragenen Kontrollen durchgeführt und festgestellte Mängel abgestellt wurden.

Ort, Datum		Unterschrift verantwortliche Person	
Protokoll abgelegt bei		Aufbewahrung bis	

Dieses Protokoll zusammen mit der Gebrauchsanweisung, den Prüfberichten und den Lieferscheinen des Verbrauchsmaterials aufbewahren. Bei mehreren Geräten je Gerät ein eigenes Protokoll führen.

Vorlage: steinbach-gaukel.de/aed-pruefprotokoll.html · Stand 08/2026 · Sachliche Information, keine Rechtsberatung. Maßgeblich sind die Gebrauchsanweisung des Geräts und die jeweils geltende Fassung der MPBetreibV.